

⚠ Medication Cup Cleaning Instructions *Medicación Instrucciones de limpieza de la Copa*



1

Use a clean tub and dishwashing liquid.

Utilice una tina limpia y detergente para platos.



2

Add a few drops of dishwashing liquid.

Añadir unas gotas de detergente líquido.



3

Use clean warm water.

Use agua tibia y limpia.



4

Add the protective cap.

Añadir la tapa de protección.



5

Rinse the med cup thoroughly.

Enjuague bien la copa med.



6

Rinse both sides with clean water.

Enjuague ambos lados con agua limpia.

Spare Medication Cups:

It is highly recommended to have spare medication cups on hand to ensure continuity of treatment.

Spare medication cups may be purchased by calling 1.800.525.4339

Perdona Copas para la medicina:

Es muy recomendable tener tazas medicación repuesto a mano para garantizar la continuidad del tratamiento. Tazas medicación repuesto se pueden comprar llamando al 1.800.525.4339